

Guide til fremstilling af konus- og teleskopkonstruktioner

Step 1

- Præparation af tænderne, der indgår i konstruktionen
- Husk at præparere godt af, især facial og occlusal (der skal være plads til konushætter, yderkroner samt protesetand)
- Præparationen skal være så parallel som muligt
- Husk at bestille en bidplastron

Step 2

- Indprøvning af konushætter
- Konushætterne tages ud i silikoneaftryk – Konushætterne må IKKE cementeres
- Bidregistrering – Plastronen skal kunne placeres på arbejdsmodellen, som er den der fremstilles af aftrykket med Konushætterne
- Husk at angive tandfarve

Step 3 Kan ved sikker registrering i Step 2 springes over

- Indprøvning af tandopstilling

Step 4

- Cementering af den færdige konstruktion
- Hele konstruktionen cementeres i en fase
- Put et tyndt lag vaseline imellem konushætterne og yderkronerne, således der ikke kommer cement mellem kronerne

Mellem hvert step er der ca. 2 ugers leveringstid